



Safeflow

Nadelfreies Infusionssystem


Infusionszubehör

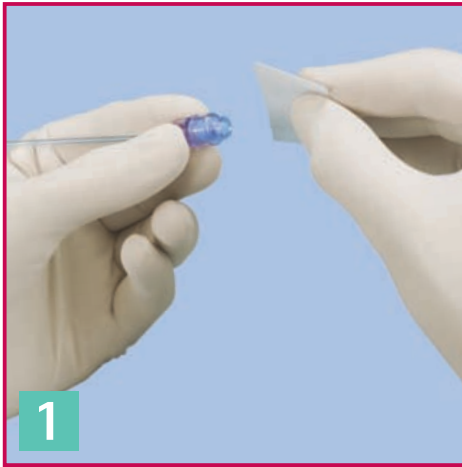


Wischen Sie das Safeflow mit einem Alkoholtupfer (entsprechend den Hygienerichtlinien Ihres Hauses) und lassen Sie das Desinfektionsmittel gut trocknen.

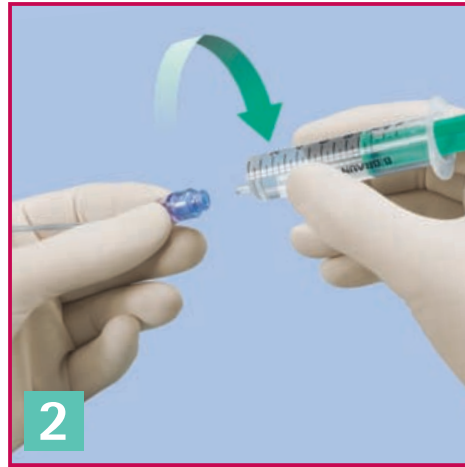

Setzen Sie die Spritze auf bzw. schließen Sie die Infusionsleitung direkt an das Safeflow-Ventil an und drehen Sie im Uhrzeigersinn. Das Safeflow-Ventil öffnet sich erst dann, wenn die Spritze bzw. die Infusionsleitung angeschlossen ist. Applizieren Sie die Lösung.

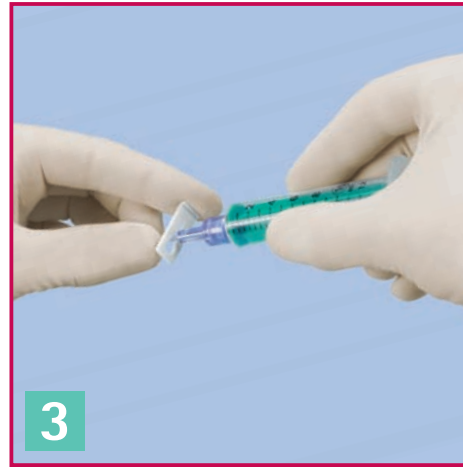

Wenn Sie mit Verlängerungsleitungen arbeiten, schließen Sie die Klemme, bevor die Spritze entfernt wird. Lassen Sie konnektierte Luer-Steck-Spritzen nicht unbeaufsichtigt.

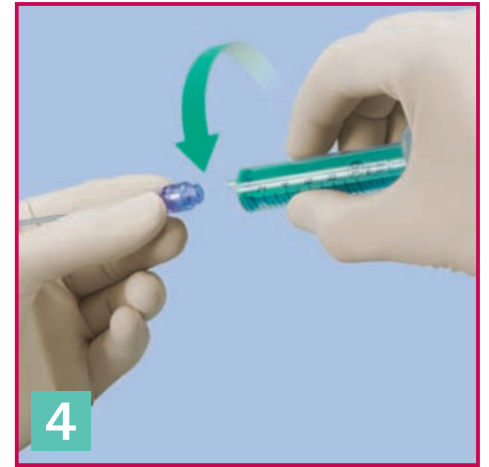


Um die Spritze bzw. die Infusionsleitung abzunehmen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn. Safeflow schließt sich automatisch, sobald die Spritze bzw. die Leitung abgenommen wird. Keine sterile Verschlusskappe erforderlich.

Anwendungsvorteile

- Einfache Desinfektion durch Alkoholtupfer
- Kompatibel mit Luer-Steck- und Luer-Lock-Ansätzen
- Ermöglicht häufigen Zugang für die direkte Aspiration oder Medikamenteninjektion
- Passend zu allen Infusionssystemen



Sicher & Einfach

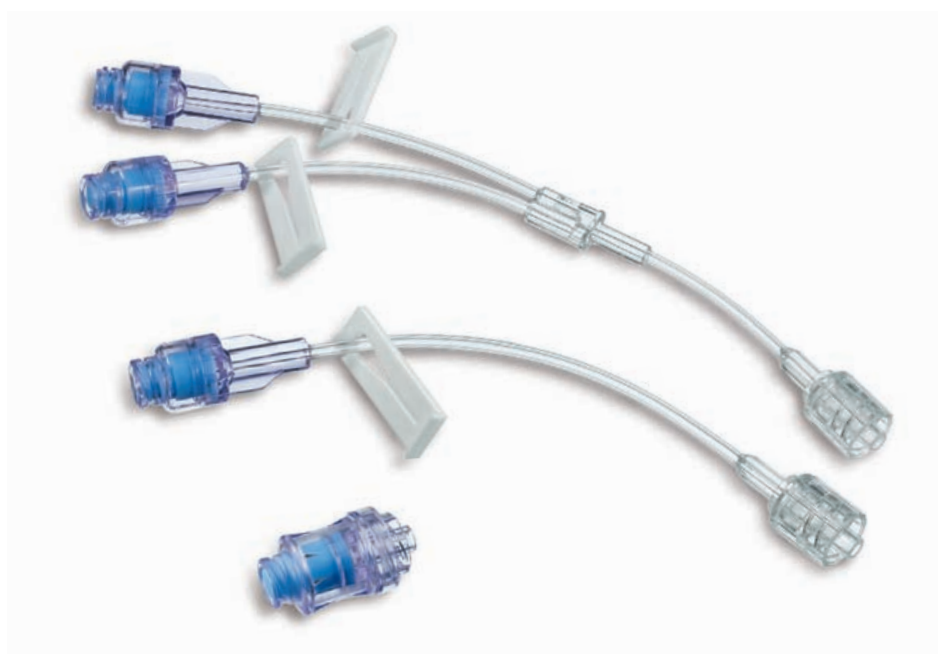

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen · Deutschland · Tel (0 56 61) 71-0 · Fax (0 56 61) 71-2732 · www.bbraun.de

B. Braun Melsungen AG · OPM · Carl-Braun-Straße 1 · 34212 Melsungen · Tel (0 56 61) 71-33 99 · Fax (0 56 61) 71-35 50