

Steckbeckenaufbereitung

THERMO ALKA CLEAR

Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten

- Verhindert Verkalkung der Steckbeckenspülen
- Fördert eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schaumarm



Produktbeschreibung

THERMO ALKA CLEAR ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller. Es gewährleistet eine rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, reduziert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist extrem schaumarm eingestellt.

Anwendungsgebiete

THERMO ALKA CLEAR ist zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller geeignet. THERMO ALKA CLEAR reduziert die Verkalkung von Steckbeckenspülen.

Anwendung

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z. B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Flächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion

zugänglich sein. THERMO ALKA CLEAR zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen. Hinweis (bei Programmeinstellung beachten): Zudosierung erst ab 30 °C.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Nicht für nicht-thermische und nicht-alkalibeständige Steckbeckenspülen geeignet.

Dosierung

Je nach Automatentyp und Wasserhärte: 1 - 4,5 ml/l (siehe Herstellerangaben) (0,1 - 0,45 %)

Dosierung durch Fachpersonal durchführen!

Zusammensetzung

Polycarboxylate 15 - 30 %

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von THERMO ALKA CLEAR wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Aluminium, Kupfer, Messing, Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM). Die Anwendung THERMO ALKA CLEAR ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Acrylonitril-butadien-styren (ABS).

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.
THERMO ALKA CLEAR	Kanister	4,25 L	3	00-137-050
Dosierhilfen	Dosierpumpe	500/1000 ml	1	00-906-005-02
	Kanisterdosierpumpe	5 L/10 L	1	00-906-000-01
	Kanisterumfüllhahn	5 L/10 L	1	00-907-000
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050

