

B. Braun Wipes

Nachfüllbarer Vliestuchspender
Desinfektion



Eigenschaften

B. Braun Wipes

- nachfüllbarer Vliestuchspender
- zum Befüllen mit ca. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung
- Vliesrolle mit 100 Tüchern à 19 x 36 cm
- bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- gebrauchsfertige Lösung ist 4 Wochen anwendbar
- wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- saugfähige und fusselfreie Tücher, die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft



B. Braun Wipes ... sparsamer Verbrauch und einfach in der Anwendung


Hinweise zur Anwendung



1. Handschuhe tragen



2. Vliestuchrolle einsetzen

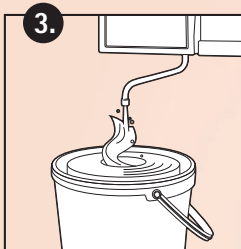

3. Ca. 2,5 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist



4. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch verwerfen; Deckel immer unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen



5. Aufkleber beschriften und aufkleben

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit dem B. Braun Wipes Spendersystem geprüft. B. Braun Wipes Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ
Hexaquant® forte	0,5 %	60 Min.
Hexaquant® plus	0,5 %	60 Min.
Hexaquant® plus lemon fresh	0,5 %	60 Min.
Melsept® SF	1,0 %	60 Min.
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.

Das eingefüllte Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel muss mit dem B. Braun Wipes Spendersystem sowie den B. Braun Wipes Vliesrollen kompatibel sein. Lassen Sie sich die Kompatibilität vom Hersteller der Desinfektions- und Reinigungsmittel bescheinigen.

Weitere Hinweise

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Spendersystem neu befüllt werden. Vorher alle Oberflächen des B. Braun Wipes Spendersystems gründlich mit einem in Desinfektionsmittellösung getränkten Lappen reinigen, desinfizieren und trocknen lassen. Einwirkzeit der Desinfektionsmittellösung beachten.

praktisch und sparsam



Lieferform	REF	PZN
Spendersystem mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19162	6067637
Vliesrolle mit 100 Tüchern	19164	6067643