

ReadyWrap®

Messpunkte des Arms & Artikel-Übersicht.

Führen Sie die Messung am locker aufliegenden Arm bei leicht gebeugtem Ellenbogen durch. Die Messpunkte entsprechen den folgenden anatomischen Orientierungspunkten:

Umfangs-Messpunkte:

- cA größter Umfang der Handfläche, direkt unter den Fingergrundgelenken
- cC geringster Umfang des Handgelenks
- cE rund um das Ellenbogengelenk und die Ellenbeuge
- cG am Oberarm direkt unter der Achselhöhle

Längenmaße:

- IA-C die Länge zwischen Punkt cA und Punkt cC
- IC-G die Länge zwischen Punkt cC und Punkt cG

Anmerkung:

c = Umfang, l = Länge

Alle Längenmessungen sollten der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.

