



Gebrauchsfertiges Tuch für den Einsatz in Kombination mit einem Mopphalter für Böden und harte Oberflächen.

## mikroloid® power mop

### Unser Plus

- sporizid
- ready-to-use
- einfache Handhabung

### Anwendungsgebiete

Einsatz für Böden und andere harte Oberflächen.

### Anwendungshinweise

Zur Verwendung mit einem geeignetem Mopphalter mit Kletthaftung. Handschuhe tragen. Mopp entnehmen und wischen. Auf vollständige Benetzung achten. Deckel der Spenderbox abnehmen. Folienbeutel in Spenderbox einlegen und öffnen. Deckel wieder fest verschließen.

**Haltbarkeit nach Anbruch:** 1 Monat. Bei alternativer Anwendung ohne Spenderbox ist das Produkt innerhalb eines Tages zu verbrauchen. Wiederbefüllbare Spenderbox, geeignet nur für die Verwendung mit einem Nachfüllpack "mikroloid power mop"! Nur für berufsmäßige Verwender.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615	gebrauchsfertig	5 Min.
mykobakterizid EN16615	gebrauchsfertig	15 Min.
fungizid EN13624, EN16615	gebrauchsfertig	15 Min.
begrenzt viruzid PLUS EN14476	gebrauchsfertig	5 Min.
viruzid EN14476	gebrauchsfertig	30 Min.
sporizid EN17126	gebrauchsfertig	60 Min.



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 0,048 g Peressigsäure, 0,12 g Glycolsäure, weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid

## Besondere Hinweise

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Schutzhandschuhe tragen. Nicht zur Desinfektion von Buntmetallen und säureempfindlichen Oberflächen geeignet. Im Zweifel ist die Eignung vor der erstmaligen Anwendung an unauffälliger Stelle zu prüfen.

### mikrocid power mop:

mikrocid power mop Set:

Karton mit 1 Eimer + Refill mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003372

mikrocid power mop Refill:

Karton mit 2x Refill Bag mit 20 Tüchern

Artikel Nummer: 70003237

### Zubehör:

Equipment:

Karton mit 1 x Wandhalterung

Artikel Nummer: 60000501

Karton mit 1 x Wischmophalter

Artikel Nummer: 60000488

Karton mit 6 x Klettpad

Artikel Nummer: 60000490

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrocid power mop M Refill 20 ST BT	2/Karton	70003237 PZN: 17889756
mikrocid power mop Set Refill 20er + Box	1/Karton	70003372

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

Manufacturer:  
S.U.MO. GmbH  
Kirchstr. 28  
21227 Bendestorf  
GERMANY  
Tel. +49 40 328907271



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)