



GRÖSSE					
	26-32 cm	28-34 cm	32-40 cm	38-48 cm	46-56 cm
	48-52 cm	50-56 cm	54-60 cm	58-68 cm	66-78 cm
	45163-00	45164-00	45165-00	45229-00	45228-00
	45163-01	45164-01	45165-01	45229-01	45228-01

1.

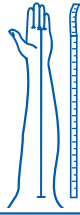


2.

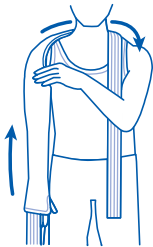

3.



4.

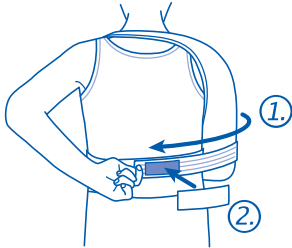


Tricodur®


by Actimove®

Gilchrist
Fixierungsbandage für
Schulter und Oberarm

1.

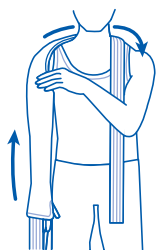


2.

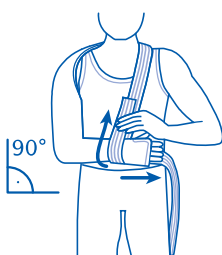

3.



4.

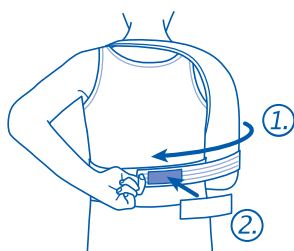

DE

Tricodur®

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für Tricodur® Gilchrist entschieden haben.

Produktbeschreibung

Tricodur® Gilchrist ist eine sofort einsetzbare Fixierungsbandage für Schulter und Oberarm, die den Oberarm sicher in Adduktionsstellung hält. Die elastische und atmungsaktive Bandage trägt durch leichte Kompression zur Rückbildung von Schwellungen bei und kann sowohl links als auch rechts getragen werden. Bitte befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen. Gute Besserung!

Verwendungszweck

Tricodur® Gilchrist ist zur Fixierung des Oberarms und der Schulter vorgesehen.

Die Anwendungsgebiete umfassen:

- Postoperativer Gebrauch
- Schulterluxationen (Verrenkungen)
- Distorsionen (Verstauchungen)
- Verletzungen der Rotatorenmanschette
- Scapulafrakturen (Brüche des Schulterblatts)
- Subkapitale Humerusfrakturen (Oberarmkopfbürche) und Humerusschaftfrakturen
- Tendomyopathie (schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung)
- Geringfügige Instabilitäten der Schulter

Hinweise zum Gebrauch

Tricodur® Gilchrist ist für den Einpatientengebrauch bestimmt.

Hinweis: Das erste Anlegen der Tricodur® Gilchrist sollte von einem Therapeuten oder ausgebildeten Spezialisten aus dem Gesundheitswesen durchgeführt werden, damit eine optimale Anpassung und eine therapeutische Stützfunktion sichergestellt sind. Auch beim Ablegen und korrekten Wiederanlegen von Tricodur® Gilchrist werden Sie Hilfe benötigen. Wenn Sie unsicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Anwendung

1. Legen Sie den Arm in die Öffnung des Schlauchverbandes und ziehen Sie den Schlauch über den Arm, bis die Fingerspitzen des Patienten am Handteil der Bandage sichtbar werden. Halten Sie die Hand des Patienten fest und ziehen Sie den Schlauch mit leichtem Zug über den gesamten Arm bis hin zum Schultergelenk.
2. Legen Sie den Schultergurt über die Schulter und um den Hals nach vorn. Bringen Sie den verletzten Arm am Ellenbogen in einen 90-Grad-Winkel. Führen Sie den Gurt unter dem Handgelenk durch und wieder nach oben. Befestigen Sie ihn mithilfe des Klettverschlusses.
3. Legen Sie den Gurt des Handteils um den Rücken und führen Sie ihn zwischen Oberarm und Rumpf nach vorne.
4. Führen Sie den Gurt nun um den Oberarm und dann auf dem gleichen Weg wieder zurück. Drücken Sie den Klettverschluss auf den Schaum und schließen ihn mit passender Spannung. (1) Zum Schutz der Kleidung kann die Außenseite des Klettverschlusses mit zusätzlichem Vlies abgedeckt werden. (2)

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, wodurch allergische Reaktionen hervorgerufen werden können.

Reinigung und Pflege

Tricodur® Gilchrist ist für die Hand- und Maschinenwäsche geeignet (bei 30 °C-Schonwaschprogramm). Schließen Sie die Klettverschlüsse vor dem Waschen. Bitte nicht bleichen, chemisch reinigen, im Wäschetrockner trocknen oder bügeln. Achten Sie darauf, dass die Bandage vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder anlegen. Keinerlei Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckentferner verwenden.

Anmerkung

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der BSN medical GmbH und Ihrer lokalen zuständigen Behörde.

Tricodur®

by Actimove®

Gilchrist

Fixierungsbandage für
Schulter und Oberarm



Schonwaschgang
max. 30°C



Nicht
bleichen



Flach
trocknen



Nicht
bügeln



Nicht
trocken
reinigen



Enthält Natur-
kautschuklatex

essity



BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg

JBR17961.01 REV 08/2022