

Venenpunktionsbestecke ohne Sicherheitsmechanismus zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion/Blutentnahme

- Aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit 3-Facettenschliff
- Silikonisiert

Punktionskanüle

- Große, weiche Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung

Ineinandergreifende Flügel

- Knickstabil
- Länge: 30 cm
- Transparent
- Aus PVC
- Nicht hergestellt mit Latex oder DEHP

Schlauch

- Luer-Lock-Ansatz gemäß DIN EN ISO 80369-7
- Mit transparentem Verschlusskonus

Konnektor



Anwendungsschritte

Blutentnahme und Kurzinfusion

1 Desinfektion der Punktionsstelle	Desinfektion der Punktionsstelle gemäß den hausinternen Richtlinien.
2 Auspacken des Produktes	Öffnen der Verpackung an der oberen Peillasche und Entnahme von Venofix® A.
3 Empfehlung: Vorbereiten des Produktes	Die Maße der Verpackung sind sehr gut an die Größe des Produktes angepasst – das Rückstellverhalten des in der Verpackung aufgerollten Schlauches kann durch Ausstreifen zwischen Daumen und Zeigefinger reduziert werden.
4 Vorbereitung zum Entlüften*	Den Lock-Verschluss am Schlauchende um eine Viertel Umdrehung aufdrehen.
5 Venenpunktion	Nach dem Entfernen der Schutzkappe die geeignete Vene punktieren. Die Kanüle dazu an den zusammengeklappten Flügeln festhalten. Der Bluteintritt in den Schlauchansatz bestätigt die erfolgreiche Venenpunktion.
6 Beenden des Entlüftens	Lock-Verschluss wieder schließen, um zu verhindern, dass Blut austritt.
7 Fixierung	Kanüle mit heruntergeklappten Flügeln und den Schlauch mit Pflaster in Form einer Zugentlastungsschleife an der Haut befestigen.
8 Konnektion	Nach Entfernen des Lock-Verschlusses Konnektion des Blutentnahmezubehörs bzw. des vorbereiteten Infusionssystems.
9 Entfernen und Entsorgen	Nach Abschluss der Anwendung die Kanüle in Position halten und die Fixierung von der Haut lösen – anschließend die Kanüle entfernen und unmittelbar in einen dafür zugelassenen Behälter entsorgen.

* Alternativ kann im Rahmen einer Kurzinfusion – vor der Venenpunktion – retrograd durch Anschließen des Venenpunktionsbesteckes an das vorbereitete Infusionssystem entlüftet werden.

Bestellinformationen

Venofix® A¹ – Venenpunktionsbestecke ohne Sicherheitsmechanismus

Farbcode	Größe (G = Gauge)	Maße (mm)	Schlauchlänge (cm)	Durchflussrate (ml/min)	Verkaufseinheit (Schachtel/Karton)	Art.-Nr. (REF)	PZN
■	27G	0,4 x 16	30	0,35	50 Stück/1.000 Stück	4056388N	17935309
■	25G	0,5 x 19	30	3,7	50 Stück/1.000 Stück	4056370N	17935284
■	23G	0,65 x 19	30	7,8	50 Stück/1.000 Stück	4056353N	17935278
■	21G	0,8 x 19	30	20	50 Stück/1.000 Stück	4056337N	17935255
■	19G	1,1 x 19	30	36,5	50 Stück/1.000 Stück	4056310N	17935249

Medibox®² – Sichere Abfallbehältnisse

	Artikelbezeichnung	Verkaufseinheit (Schachtel/Karton)	Art.-Nr. (REF)	PZN
	Medibox® 0,8 L ① (max. Füllvolumen: 0,67 L)	18 Stück	9193424	16400687
	Medibox® 2,4 L ② (max. Füllvolumen: 2 L)	27 Stück	9193600	13847399
	Medibox® 4,7 L ③ (max. Füllvolumen: 3,9 L)	25 Stück	9193618	13847376
	Medibox® 5,7 L ④ (max. Füllvolumen: 4,8 L)	25 Stück	9193627	13847382
	Medibox® 6,8 L ⑤ (max. Füllvolumen: 5,7 L)	22 Stück	9193639	14410285
	Medibox® 9,1 L ⑥ (max. Füllvolumen: 7,7 L)	13 Stück	9193640	13856665

Halterungssysteme für Medibox®

	Stangenhalterung für Medibox® 6,8 Liter*	1 Stück	9193639-0	–
	Befestigungsschraube für Medibox® 9,1 Liter*	1 Stück	9193640-0	–

* Die Halterungssysteme sind ausschließlich für die jeweils angegebene Behältergröße geeignet und nicht mit anderen Behältergrößen kompatibel.



Für weitere Infos:
bitte scannen/klicken

Softasept® N¹ – Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel¹

	Artikelbezeichnung	Verkaufseinheit (Schachtel/Karton)	Art.-Nr. (REF)	PZN
	Softasept® N, farblos, 250 ml-Sprühflasche	20 Stück	3887138	08505018



Für weitere Infos:
bitte scannen/klicken

Softasept® N

Zus.: 100 g Lsg. enth.: Wirkst.: Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g Sonst. Bestandt.: Gereinigtes Wasser

Anw.: Hautdesinf. v. operativ. Eingriffen, Punktionen u. Injektionen

Gegenanz.: Überempf. gg. Ethanol oder 2-Propanol. Nicht f. d. Antiseptik v. Schleimhäuten u. zur Anw. in unmittelb. Umgebung der Augen geeignet.

Warnhinw.: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen!

Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut od. auf Schleimhäuten anw. Nur z. äußerl. Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpkt. nach DIN 51755.

Nebenw.: Hautirritationen (Rötung, Brennen, insbes. b. häufiger Anw.). Kontaktallergien.

Stand 03/2015 | B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

1 Diese Produkte sind über Sprechstundenbedarf abrechenbar. Bitte berücksichtigen Sie die jeweilige regionale Sprechstundenbedarfsvereinbarung.

2 Diese Produkte sind über Praxisbedarf abrechenbar.