

Suprasorb® P SensiFlex

Silikon-Schaumverband, steril

REF 400200 - 400210, 400211 – 400218, 401100 - 401111,
401115 - 401123

November 2025

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Der Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverband besteht aus:

Suprasorb® P SensiFlex border / multisite border:

Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliessschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer Trägerschicht.

Suprasorb® P SensiFlex border lite / multisite border lite:

Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliessschicht und einer Trägerschicht.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbeschreibung	Merkmal
401106	Suprasorb® P SensiFlex border	5 x 5 cm, steril
401107	Suprasorb® P SensiFlex border	7,5 x 7,5 cm, steril
401101	Suprasorb® P SensiFlex border	7,5 x 8,5 cm, steril
401116*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	7,5 x 8,5 cm, steril
401100	Suprasorb® P SensiFlex border	10 x 10 cm, steril
401115*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	10 x 10 cm, steril
401109	Suprasorb® P SensiFlex border	12,5 x 12,5 cm, steril
401122*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	12,5 x 12,5 cm, steril
400200	Suprasorb® P SensiFlex border	15 x 15 cm, steril
400214*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	15 x 15 cm, steril
400204	Suprasorb® P SensiFlex border	15 x 20 cm, steril
400202	Suprasorb® P SensiFlex border	20 x 20 cm, steril
400211*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	20 x 20 cm, steril
400206	Suprasorb® P SensiFlex border	10 x 30 cm, steril
400213*	Suprasorb® P SensiFlex border LPPR	10 x 30 cm, steril
401102	Suprasorb® P SensiFlex border lite	5 x 5 cm, steril
401117*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	5 x 5 cm, steril
401103	Suprasorb® P SensiFlex border lite	5 x 10 cm, steril
401118*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	5 x 10 cm, steril

REF	Produktbeschreibung	Merkmal
401111	Suprasorb® P SensiFlex border lite	6 x 12 cm, steril
401121*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	6 x 12 cm, steril
401110	Suprasorb® P SensiFlex border lite	9 x 15 cm, steril
401123*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	9 x 15 cm, steril
401108	Suprasorb® P SensiFlex border lite	7,5 x 7,5 cm, steril
401105	Suprasorb® P SensiFlex border lite	7,5 x 8,5 cm, steril
401120*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	7,5 x 8,5 cm, steril
401104	Suprasorb® P SensiFlex border lite	10 x 10 cm, steril
401119*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	10 x 10 cm, steril
400201	Suprasorb® P SensiFlex border lite	15 x 15 cm, steril
400203	Suprasorb® P SensiFlex border lite	10 x 20 cm, steril
400212*	Suprasorb® P SensiFlex border lite LPPR	10 x 20 cm, steril
400205	Suprasorb® P SensiFlex border lite	15 x 20 cm, steril
400207	Suprasorb® P SensiFlex multisite border	7,5 x 9,5 cm, steril
400215*	Suprasorb® P SensiFlex multisite border LPPR	7,5 x 9,5 cm, steril
400210	Suprasorb® P SensiFlex multisite border	12 x 15 cm, steril
400218*	Suprasorb® P SensiFlex multisite border LPPR	12 x 15 cm, steril
400208	Suprasorb® P SensiFlex multisite border	16 x 20 cm, steril
400216*	Suprasorb® P SensiFlex multisite border LPPR	16 x 20 cm, steril
400209	Suprasorb® P SensiFlex multisite border lite	7,5 x 9,5 cm, steril
400217*	Suprasorb® P SensiFlex multisite border lite LPPR	7,5 x 9,5 cm, steril

*REFs nur für Frankreich

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

1 Stück = 1 Vierrandsiegelbeutel
bestehend aus Polyethylenterephthalat, Polyethylen und Zellulose

2.2 Handelpackung / Shelf Container

10 Stück = 10 Vierrandsiegelbeutel = 1 Faltschachtel bestehend aus Zellulose,
mit 1 Gebrauchsanweisung aus Zellulose

REF 400206:

5 Stück = 5 Vierrandsiegelbeutel = 1 Faltschachtel bestehend aus Zellulose,
mit 1 Gebrauchsanweisung aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste, bestehend aus Zellulose:

REF	Stück	Faltschachteln
400200, 400201, 400203, 400212, 400214	150	15
400202, 400204, 400205, 400210, 400211, 400218	100	10
400206	200	40
400208, 401100, 401101, 401103, 401104, 401105, 401107, 401108, 401109, 401110, 401115, 401116,	200	20

REF	Stück	Faltschachteln
401118, 401119, 401120, 401122, 401123		
401102, 401106, 401117	240	24
400213	250	25
400207, 400209, 400217, 400215	300	30
401111, 401121	400	40

3. Herstellung

Die Angaben zur Herstellung obliegen dem Legalhersteller (Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.)

4. Beschreibung

Der Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverband ist ein steriler Wundverband zum Einmalgebrauch.

Der Suprasorb® P SensiFlex border und multisite border Wundverband verfügt über eine innovative fünfschichtige Struktur, die aus einer weichen Silikon-Wundkontaktschicht, einer superabsorbierenden Polyacrylat-Faserschicht, einer Vlies-Verteilschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht und einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Polyurethan-Folienschicht besteht.

Verteilschicht und Saugkern sind perforiert, was den Wundverband flexibler macht.

Der Suprasorb® P SensiFlex border lite und multisite border lite Wundverband verfügt über eine vierschichtige Struktur, die aus einer weichen Silikon-Wundkontaktschicht, einer dünnen und flexiblen Polyurethan-Schaumschicht, einer Vlies-Verteilschicht und einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Polyurethan-Folienschicht besteht. Die Verteilschicht ist perforiert, was den Wundverband flexibler macht.

5. Eigenschaften

- Das effiziente Exsudatmanagement reduziert Mazerationen.
- OptiSil Silikon-Wundkontaktschicht: reduziert das Risiko des Verklebens mit der Wunde
- Die WaveCut Technology sorgt für hervorragende Flexibilität und An-schmiegsamkeit und reduziert so das Risiko einer frühzeitigen Ablösung (basierend auf Computermelldaten)

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Der Suprasorb® P SensiFlex border und multisite border ist für eine Vielzahl von exsudierenden Wunden vorgesehen wie Dekubitus, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden und Hautrisse.

Der Suprasorb® P SensiFlex border lite und multisite border lite ist für eine Vielzahl von nicht bis schwach exsudierenden Wunden wie Dekubitus, Bein- und Fußulzera, postoperative Wunden, traumatische Wunden und Hautrisse vorgesehen.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverband ist gemäß Regel 4 ein Medizinprodukt der Klasse IIb (gemäß Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die Angaben zur biologischen Beurteilung und Verträglichkeit obliegen dem Legalhersteller (Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.)

9. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung (an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von 5 bis 40°C) beträgt die Haltbarkeit des Suprasorb® P SensiFlex Silikon-Schaumverbands 3 Jahre ab Herstellungsdatum.

10. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.

Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

11. Legalhersteller:

Hiermit bestätigt der nachfolgend genannte Legalhersteller die Richtigkeit der in diesem Produktdatenblatt gemachten Angaben:

Legalhersteller:

Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.
North Shangxia Road
Dongjiang Hi-tech Industry Park
516005 HuiZhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Distributor:

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
56579 Rengsdorf
Germany

Die englische Original-Version des Produktdatenblattes wurde vom Legalhersteller und dem Distributor gegengezeichnet. Somit ist die Übersetzung dieses Dokumentes in die deutsche Version ohne Signatur gültig.

EC-REP:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80
20537 Hamburg
Germany