

ES-Kompressen (unsteril)

MEDIZINPRODUKT

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Weißer Mullkompressen sind wirkstofffreie Produkte, die zu 100 % aus Baumwolle bestehen. Sie sind mit unterschiedlichen Fadenzahlen pro cm², in verschiedenen Größen und mit unterschiedlich vielen Lagen erhältlich. Auseinanderfaltbar für größere Größen.

Unsterile Mullkompressen zum Einmalgebrauch können von Laien und medizinischen Fachkräften auf menschlicher Haut verwendet werden. Sie können auf intakter Haut für längere Zeiträume und auf verletzter Haut für kurze Zeiträume aufgebracht werden. Sie dienen zur Reinigung der Haut, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten, als mechanische Barriere, als primäre oder sekundäre Wundauflage sowie als Trägermaterial für externe Präparate. Mullkompressen werden mithilfe von Fixierungsmaterial am Patienten befestigt und können im Rahmen der Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Medizinprodukt der Klasse: I

Anwendung/Indikation

Mullkompressen ermöglichen die Aufnahme von Körperflüssigkeiten (z. B. Exsudat, Blut) durch ihr leichtes, weitmaschiges Baumwollgewebe (Gaze); dadurch eignet sich das Produkt auch als Trägermaterial für externe Präparate, wie z. B. Desinfektionsmittel, Salben, und/oder als mechanische Barriere. Das Produkt wird mit Bandagen, Klebestreifen oder anderem Fixierungsmaterial als primäre und/oder sekundäre Wundauflage am Patienten befestigt.

Unabhängig von der Anzahl der Lagen können ES Kompressen Mullkompressen bis auf 4 Lagen aufgeklappt werden, ohne dass störende Randfäden auftreten. Das Produkt eignet sich:

- als primäre Wundauflage für kleine Wunden
- als sekundäre Wundauflage für akute und chronische Wunden
- zur Reinigung der Haut
- zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten
- als mechanische Barriere
- als Trägermaterial für externe Präparate wie z. B. Desinfektionsmittel und Salben

Das Produkt kann im Rahmen einer Kompressionstherapie verwendet werden.

Artikelnummern

REF	name	Größe [cm]	Mulltyp	Zahl der Lagen	Stück pro Papierbeutel
4018219	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	8	100
4018238	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	8	100
4018255	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	8	100
4018355	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	12	100
4018315	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	12	100
4018337	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	12	100
4018368	ES Kompressen (unsteril)	10 x 12,5	17-fädig	12	100
4018375	ES Kompressen (unsteril)	10 x 20	17-fädig	12	100
4018415	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	16	100
4018438	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	16	100
4018455	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	16	100
4018467	ES Kompressen (unsteril)	10 x 12,5	17-fädig	16	100

ES-Kompressen (unsteril)

REF	name	Größe [cm]	Multityp	Zahl der Lagen	Stück pro Papierbeutel
4078218	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	8	100
4078238	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	8	100
4078254	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	8	100
4078315	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	12	100
4078334	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	12	100
4078355	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	12	100
4078368	ES Kompressen (unsteril)	10 x 12,5	17-fädig	12	100
4078375	ES Kompressen (unsteril)	10 x 20	17-fädig	12	100
4078415	ES Kompressen (unsteril)	5 x 5	17-fädig	16	100
4078435	ES Kompressen (unsteril)	7,5 x 7,5	17-fädig	16	100
4078454	ES Kompressen (unsteril)	10 x 10	17-fädig	16	100
4078465	ES Kompressen (unsteril)	10 x 12,5	17-fädig	16	100

Warnhinweise

Nicht zur Verwendung bei chirurgischen Eingriffen.

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Produktentsorgung

Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten der ES Kompressen gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

ES Kompressen, unsteril	
Eigenschaft	Wert
Sinkzeit	< 10 sec
Zahl der Fäden	Kettfäden 100 ± 5/100 mm Schussfäden 70 ± 4/100 mm
Zugfestigkeit – trocken	Kettfäden ≥ 50 N/50 mm

ES-Kompressen (unsteril)

	Schussfäden ≥ 30 N/50 mm
Optische Aufheller	keine
Flächengewicht	≥ 23 g/m ²

Materialieigenschaften

Mull

100 % chlorfrei gebleichte Baumwolle gemäß EN 14079

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code z. B.:



0

12

XXXXXX

Jahr

Woche
der
Produktion

Nur für interne Zwecke

Herstellungsdatum

z. B.



2022

04

01

Jahr

Monat

Tag

Verwendbar bis

z. B.



2027

04

01

Jahr

Monat

Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Einmalige Produktkennung (UDI)



Stand der Information: 2022-10-17