


Für die chronische und akute Wunde

LAVANID®

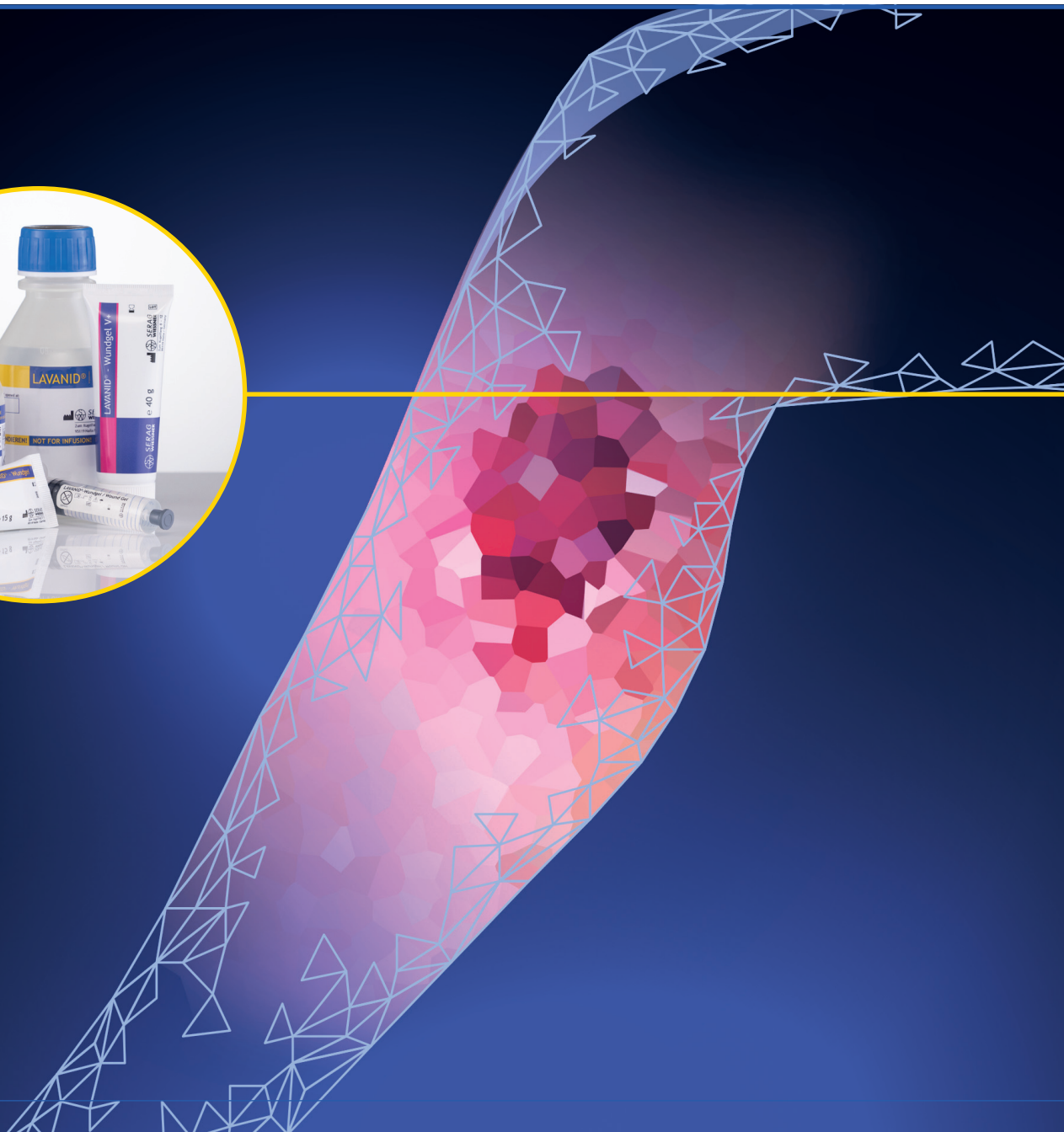



SERAG-WIESSNER hat sich auf die feuchte Wundversorgung spezialisiert und ist, durch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produktportfolio mit einer breiten Auswahl an verschiede-

nen Produktbehältnissen und Darreichungsformen, Ihr Experte in diesem Bereich.

Die LAVANID® Produktreihe ist zur Reinigung und Befeuchtung chronischer und akuter Wunden geeignet und kommt intraoperativ zum Einsatz.

Wundspüllösung auf Ringer-Basis mit
0,04 % Polyhexanid zur Konservierung

gute Gewebeverträglichkeit

Einsatzmöglichkeiten LAVANID® Wundspüllösungen:

akute und chronische Wunden
intraoperative Wunden
Verbrennungen
NPWT (Unterdrucktherapie)





LAVANID® - Wundspüllösung

LAVANID® ist eine sterile, isotone Wundspüllösung auf Basis der Ringer-Lösung mit 0,04% Polyhexanid zur Konservierung. Das Konservierungsmittel Polyhexanid verhindert das

Wachstum von Mikroorganismen in Wundauflagen und in der Lösung.

Die isotone Grundlage verhindert ein Quellen der Haut und reduziert eine Reizung des Wundbereichs.

Wundbehandlungsprodukte, die mit Polyhexanid konserviert sind, wie LAVANID®, gelten als Mittel der Wahl bei schlecht heilenden chronischen und empfindlichen Wunden, wie z.B. Verbrennungswunden.

schmerzfreie Anwendung

reduziert Entzündungszeichen

verhindert die Neubildung von Biofilm



Ausgießen mittels Schraubverschluss



Flasche mit aufgesetztem Spike zur aseptischen Entnahme.



Es gibt keine Einschränkung der Anwendungsdauer und Häufigkeit. Eine Nachbehandlung oder ein Nachspülen ist nicht erforderlich.

Anwendungsmöglichkeit

LAVANID® - Wundspüllösung:

Der Stopfenverschluss ermöglicht eine aseptische Entnahme der Spüllösung, z.B. mittels Spike. Alternativ kann zum Ausgießen der Lösung die Schraubverschlusskappe abgenommen werden.

Zusammensetzung

Ringerlösung (isotone Elektrolytlösung bestehend aus Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Wasser für Injektionszwecke), Polyhexanid 0,04 %

Aufbrauchfrist

nach dem ersten Öffnen:
2 Monate

Lieferprogramm - LAVANID® Wundspüllösung

Packungsgrößen	PZN	REF
1 x 125 ml	18660607	E18024
1 x 250 ml	18660613	E18025
1 x 1000 ml	18660642	E18027
20 x 125 ml	18660576	018024
10 x 250 ml	18660582	018025
10 x 500 ml	18771028	018026
6 x 1000 ml	18660599	018027



LAVANID® - Wundgel

LAVANID® - Wundgel ist ein steriles Hydrogel auf Basis der Ringer-Lösung und 0,04% Polyhexanid zur Konservierung. Das Konservierungsmittel

aus, z.B. bei der Anwendung in Wundhöhlen oder Wundtaschen.

Anwendungsmöglichkeiten LAVANID® - Wundgel / LAVANID® - WundgelV+

Die Wunde vorher mit LAVANID® Wundspüllösung reinigen. Das Wundgel direkt oder mit einem sterilen Spatel auf die Wunde oder Wundauflage auftragen und die Wunde verbinden. Das Wundgel verbleibt bis zum nächsten Verbandwechsel auf der Wunde. Reste des Wundgels können mit LAVANID®-Wundspüllösung abgewaschen werden.

gutes Fließverhalten

verhindert die Neubildung von Biofilm

gute Verträglichkeit

Polyhexanid verhindert das Wachstum von Mikroorganismen in Wundauflagen und im Gel. Das Hydrogel zeichnet sich durch ein gutes Fließverhalten



Einsatzmöglichkeiten LAVANID® - Wundgel / LAVANID® - Wundgel V+

zur Befeuchtung und Reinigung von akuten und chronischen Wunden
bei Verbrennungen

löst Wundbeläge (autolytisches Débridement)

verhindert die Neubildung von Biofilm



LAVANID® - Wundgel V+

LAVANID® - Wundgel V+ ist ein steriles Hydrogel auf Basis der Ringer-Lösung und 0,04% Polyhexanid zur Konservierung. Das Konservierungsmittel Polyhexanid verhindert das Wachstum von Mikroorganismen in Wundauflagen und im Gel.

Produktbedingte Schmerzen sind bei der Anwendung nicht zu erwarten. Beide Hydrogele haben einen hohen Wassergehalt (ca. 90%) und unterstützen das autolytische Débridement.

In einer klinischen Studie an Weichteilwunden wurde das Wundgel

gut vertragen. Nach den Ergebnissen sind keine lokalen Reizerscheinungen und Schmerzen zu erwarten.

bessere Haftung im Vergleich zum herkömmlichen Wundgel

verhindert die Neubildung von Biofilm

gute Verträglichkeit

Zusammensetzung

Ringerlösung (bestehend aus Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Wasser für Injektionszwecke), Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanid 0,04 %.

Lieferprogramm LAVANID® - Wundgel

Packungsgrößen	PZN	REF
1 x 15 g Tube	17817136	015275
1 x 40 g Tube	13946724	015273
1 x 100 g Tube	08837192	015274
2 x 10 g Spritze	06122661	015272
12 x 10 g Spritze	02078785	015271

Lieferprogramm LAVANID® - Wundgel V+

Packungsgrößen	PZN	REF
1 x 40 g Tube	10813543	015773
1 x 100 g Tube	10329497	015774
2 x 10 g Spritze	13576919	015772
12 x 10 g Spritze	13576925	015771

Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsmäßigen Verwendung der Produkte sind in den Gebrauchsanweisungen angegeben. Diese stehen auf der Homepage von SERAG-WIESSNER unter www.serag-wiessner.de zur Verfügung.



**SERAG
WIESSNER**

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-0

 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de

